

ProCare

Dent 40



Nachspülmittel

Flüssigkonzentrat. Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten einschließlich Übertragungsinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.


Qualitätsmerkmal

ProCare Dent 40 erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte. **CE**

Produkteigenschaften

- Verbessert und beschleunigt die Trocknung von Dentalinstrumenten bei der maschinellen Aufbereitung
- Verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer werden neutralisiert

ProCare Dent 40 ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

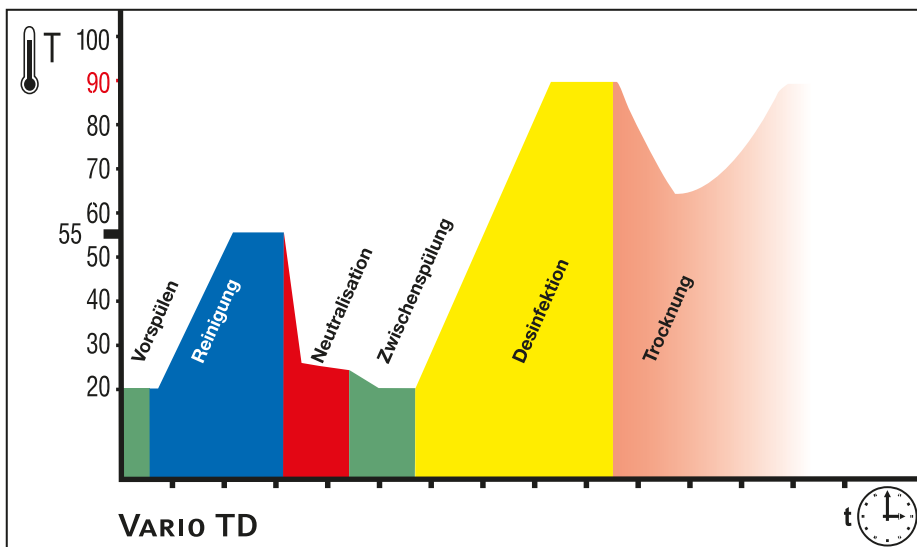

Anwendung und Dosierung

Miele ProCare Dent 40 ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

- Anwendungskonzentration: 0,3 ml/l über Türdosiergerät für Nachspülmittel
- Programmwahl varioTD

Es wird der Einsatz von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen, um Beläge und Wasserflecken zu vermeiden und eloxiertes Aluminium zu schützen.

Verfahrensablauf varioTD

- Vorspülen mit kaltem Wasser, um grobe Verschmutzungen (z.B. Blut) zu beseitigen
- Reinigen
- Neutralisieren
- Zwischenspülen mit kaltem Wasser
- Thermische Desinfektion bei 93°C/5 min Haltezeit und Nachspülen mit ProCare Dent 40 (Dosiertemperatur 93°C)
- Trocknen

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Für einen Produktwechsel ist der Miele Kundendienst anzufordern.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Thermo-Desinfektoren sind zu beachten.

ProCare

Dent 40



Technische Daten

- Dichte (20°C): 1,1 g/cm³
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20°C) 0,3 ml/l: ca. 3,8

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gem. EG-Detergenzienverordnung 648/2004

- < 5% Phosphonate
- 15 – 30% nichtionische Tenside
- Außerdem Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone)

Lagerhinweise

- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0°C bis 30°C
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

- ProCare Dent 40 ist kein Gefahrstoff gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.miele-professional.de verfügbar.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Dent 40	1 l Flasche	9 052 130

Kontaktdaten:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 666
www.miele-professional.de

Importeur für die Schweiz:
Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach



Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de