

m[®]
two

Das effiziente NiTi System



Power in Control



Clever im Design – stark in Schneidleistung und Flexibilität

Für effektives Arbeiten im Wurzelkanal

Das spezifische Design für jedes Instrument ermöglicht eine sichere und schnelle Aufbereitung.



- **Zuverlässiger maschineller Gleitpfad zur initialen Aufbereitung mit 10/.04 und 15/.05**

Großer konstanter Schneidkantenwinkel und somit mehr Windungen erhöhen die Stabilität der Instrumente.

- **Effizienter Dentinabtrag und gezielte Formgebung mit 20/.06 und 25/.06**

Aktive Schneidkanten und progressiver Schneidenabstand sorgen für effizienten Dentinabtrag und hohe laterale Schneidfähigkeit.

- **Substanzschonende Aufbereitung mit 30/.05, 35/.04, 40/.04**

Instrumente mit reduziertem Taper erweitern nur im apikalen Drittel und vermeiden unnötigen Dentinabtrag. Die geringe Belastung der Feile macht die Anwendung sehr sicher.


- **Problemlose Aufbereitung größerer Kanalanatomien z. B. mit 50/.04 oder 40/.06**

Reduzierter Querschnitt bei Instrumenten mit größeren ISO-Größen und Tapern sorgt für mehr Flexibilität der Instrumente und sichere Formgebung.




S-förmiger Querschnitt mit zwei aktiven Schneidkanten


- kleiner Instrumentenkern, dadurch hohe Flexibilität

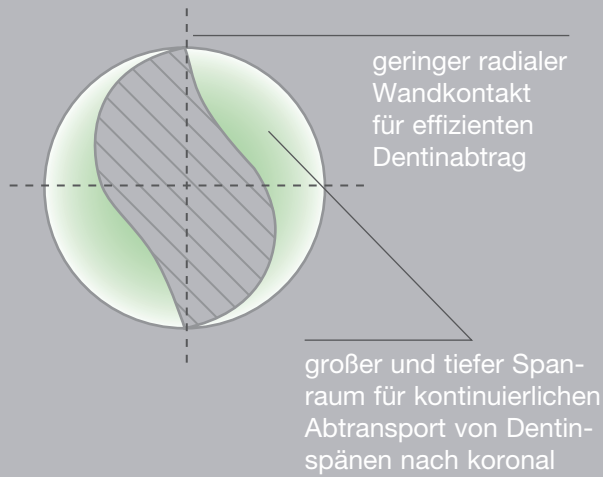

- reduzierter Querschnitt bei M_two[®] Instrumenten mit größeren ISO-Größen und Tapern, z. B. M_two[®] 40/.06

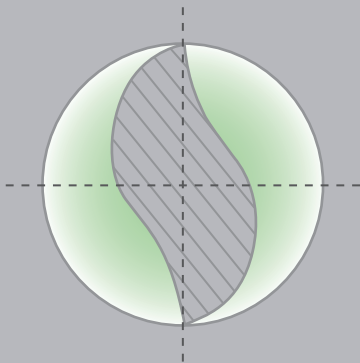

Nicht schneidende Spitze

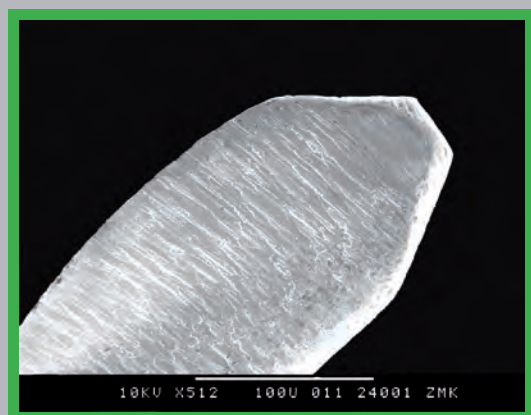

10/.04

25/.06

Kleiner Schneidenabstand, mehr Schneidkanten

Progressiver Schneidenabstand

Ein kleiner Schneidenabstand und dadurch mehr Schneidkanten erhöhen die Stabilität der Instrumente.

Ein progressiver Schneidenabstand bewirkt hohe laterale Schneidfähigkeit sowie effizienten Dentinabtrag und verhindert das Einschrauben des Instrumentes in den Kanal.

Mit einem einfachen und sicheren System von der Aufbereitung bis zur Obturation

01. Wurzelkanalaufbereitung

Leichter Umstieg von manueller zu maschineller Wurzelkanalaufbereitung


- Einfach: eine Aufbereitungssequenz für alle Wurzelkanaltypen.
- Single Length: Alle Instrumente werden auf volle Arbeitslänge gebracht.
- Simultaneous Shaping: Mtwo® schneidet während des Vordringens automatisch und lateral unter Anwendung der bürstenden Feilenbewegung.
- Abgestimmt: Jedes Instrument formt den Gleitpfad für das nächste.
- Substanzschonend: Mtwo® trägt nur so viel Substanz ab wie notwendig.

Ihre Vorteile: zuverlässiger maschineller Gleitpfad, effizienter Dentinabtrag und Formgebung, sichere Aufbereitung aller Kanalanatomien.


Basissequenz




Formgebung für größere Kanalanatomien 1

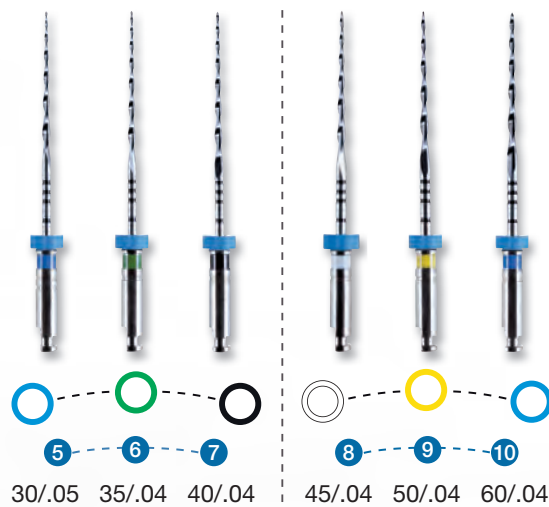

Formgebung für größere Kanalanatomien 2

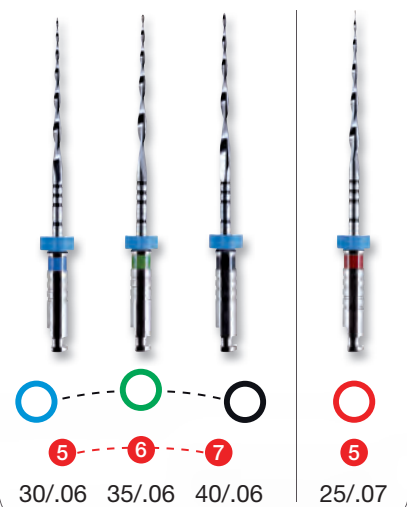

Einzigartig
Die Basissequenz ist mit 16 und 21 mm Arbeitsteil erhältlich (Arbeitslänge 25 mm)

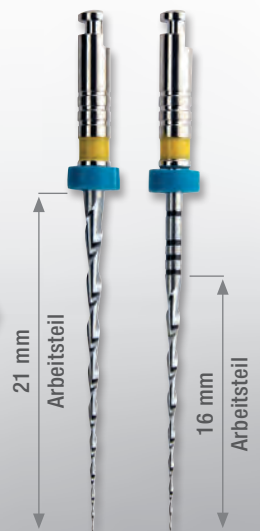

02. Wurzelkanaltrocknung und Obturation

Mtwo® ermöglicht die Formgebung des Wurzelkanals für alle Obturationstechniken.



Sterile Mtwo® Papierspitzen
Auf das Mtwo® System abgestimmte konische Papierspitzen zur schnellen Trocknung des Wurzelkanals.



Mtwo® Guttapercha

Präzise auf das Mtwo® System abgestimmte α-Guttapercha für beste Obturationsergebnisse.



GUTTAFUSION®

Trägerstift komplett aus Guttapercha zur einfachen und schnellen warmen dreidimensionalen Obturation.



BeeFill® 2in1

Warme vertikale Kondensation, mit Mtwo® Guttapercha und anschließendem Backfill für dauerhaft dichte, dreidimensionale Obturation.



03. Revision

Mtwo® Revisionsinstrumente zur effizienten Entfernung von Wurzelfüllmaterialien



Revisionsinstrument mit schneidender Spitze

R 25/.05 für weite und mittlere Wurzelkanäle

R 15/.05 für enge Wurzelkanäle



R 25/.05



R 15/.05

Mtwo® Produkte

Basissequenz

Blister à 6 Instrumente

Mtwo® Arbeitsteil 16 mm

Mtwo® Arbeitsteil 21 mm

Größe/Taper		21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04	●	V04 0234 021 010	V04 0234 025 010	V04 1234 025 010	V04 1234 031 010
15/.05	○	V04 0235 021 015	V04 0235 025 015	V04 1235 025 015	V04 1235 031 015
20/.06	●	V04 0236 021 020	V04 0236 025 020	V04 1236 025 020	V04 1236 031 020
25/.06	●	V04 0236 021 025	V04 0236 025 025	V04 1236 025 025	V04 1236 031 025

STERILE



Formgebung für größere Kanalanatomien


Blister à 6 Instrumente

Mtwo® Arbeitsteil 16 mm

Mtwo® Arbeitsteil 21 mm

Größe/Taper		21 mm	25 mm	31 mm
30/.05	●	V04 0235 021 030	V04 0235 025 030	V04 1235 031 030
35/.04	●	V04 0234 021 035	V04 0234 025 035	V04 1234 031 035
40/.04	●	V04 0234 021 040	V04 0234 025 040	V04 1234 031 040
45/.04	○	V04 0234 021 045	V04 0234 025 045	V04 1234 031 045
50/.04	●	V04 0234 021 050	V04 0234 025 050	V04 1234 031 050
60/.04	●	V04 0234 021 060	V04 0234 025 060	V04 1234 031 060
25/.07	●	V04 0237 021 025	V04 0237 025 025	V04 1237 031 025
30/.06	●	V04 0236 021 030	V04 0236 025 030	V04 1236 031 030
35/.06	●	V04 0236 021 035	V04 0236 025 035	V04 1236 031 035
40/.06	●	V04 0236 021 040	V04 0236 025 040	V04 1236 031 040

STERILE

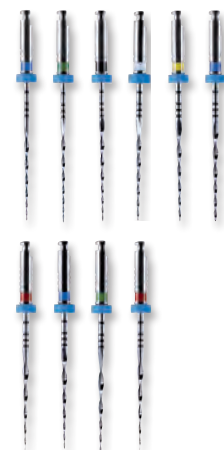

Sortierungen

Mtwo® Arbeitsteil 16 mm

Mtwo® Arbeitsteil 21 mm

Blister à 4 Instrumente	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06	V04 0007 021 701	V04 0007 025 711	V04 0007 025 701	V04 0007 031 701
30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07	V04 0007 021 702	V04 0007 025 702	-	V04 0007 031 702
Blister à 6 Instrumente	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
je 2 x 10/.04, 15/.05, 20/.06	V04 0230 021 456	V04 0230 025 456	-	-
2 x 25/.06, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07	V04 0230 021 457	V04 0230 025 457	-	-
je 2 x 10/.04, 15/.05, 20/.06	-	-	V04 1230 025 456	-
2 x 25/.06, AT 21 mm, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07, AT 16 mm	-	V04 1230 025 457	-	-
je 2 x 30/.06, 35/.06, 40/.06	-	V04 0236 025 203	-	-
je 2 x 45/.04, 50/.04, 60/.04	-	V04 0234 025 246	-	-

STERILE

Revisionsinstrumente

Blister à 6 Instrumente

Größe/Taper		21 mm
R 15/.05	○	V04 0232 021 015
R 25/.05	●	V04 0232 021 025
je 3 x R 15/.05, R 25/.05		V04 0232 021 202

STERILE



Mtwo® SystemBox

Mit Modul für übersichtliche Anordnung und Aufbewahrung der Mtwo® Instrumente, ohne Instrumente, autoklavierbar




REF _____ V04 0239



Mtwo® Control Sticker

16 Control Sticker für die Basissequenz, 12 Control Sticker für zusätzliche Größen, selbstklebend, autoklavierbar

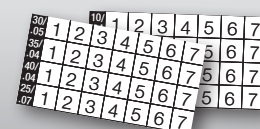

REF _____ V04 0491

Mtwo® Guttapercha

Packung à 60 Stück

Größe/Taper		28 mm
25/.06	●	V04 0220 628 025
30/.05	●	V04 0220 528 030
35/.04	●	V04 0220 428 035
40/.04	●	V04 0220 428 040
45/.04	○	V04 0220 428 045
50/.04	●	V04 0220 428 050
60/.04	●	V04 0220 428 060
25/.07	●	V04 0220 728 025
30/.06	●	V04 0220 628 030
35/.06	●	V04 0220 628 035
40/.06	●	V04 0220 628 040
20 x 25/.06, je 10 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07		V04 0220 028 457



Mtwo® Papierspitzen

STERILE

Packung à 144 Stück

Größe/Taper		29 mm
25/.06	●	V04 0225 629 025
30/.05	●	V04 0225 529 030
35/.04	●	V04 0225 429 035
40/.04	●	V04 0225 429 040
45/.04	○	V04 0225 429 045
50/.04	●	V04 0225 429 050
60/.04	●	V04 0225 429 060
25/.07	●	V04 0225 729 025
30/.06	●	V04 0225 629 030
35/.06	●	V04 0225 629 035
40/.06	●	V04 0225 629 040
48 x 25/.06, je 24 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07		V04 0225 029 457



GUTTA FUSION® Obturatoren

Blister à 6 Obturatoren

Größe		1 Blister	5 Blister
20	●	V04 1541 000 020	V04 1542 000 020
25	●	V04 1541 000 025	V04 1542 000 025
30	●	V04 1541 000 030	V04 1542 000 030
35	●	V04 1541 000 035	V04 1542 000 035
40	●	V04 1541 000 040	V04 1542 000 040
45	○	V04 1541 000 045	-
50	●	V04 1541 000 050	-
55	●	V04 1541 000 055	-



Komplett aus Guttapercha



GUTTA FUSION® Size Verifier

Blister à 6 Size Verifier

Größe		1 Blister
20	●	V04 1508 000 020
25	●	V04 1508 000 025
30	●	V04 1508 000 030
35	●	V04 1508 000 035
40	●	V04 1508 000 040
45	○	V04 1508 000 045
50	●	V04 1508 000 050
55	●	V04 1508 000 055
25-35		V04 1508 000 305



Aus Nickel-Titan



Mtwo® Basic Kit

Kit mit Instrumenten in 25 mm Arbeitslänge:

1 Blister à 6 Instrumente Mtwo®

je 2 x 10/.04, 15/.05, 20/.06, 21 mm Arbeitsteil

1 Blister à 6 Instrumente Mtwo®

je 2 x 25/.06, 21 mm Arbeitsteil,

1 x 30/.05, 35/.04, 25/.07, 16 mm Arbeitsteil

3 Plastik-Übungsblöcke

CD-ROM, Mtwo® Anwenderkarte

REF _____ V04 0238 025 000



Interim-Stand

zur Zwischenablage und Reinigung
von Wurzelkanalinstrumenten
während der Behandlung

REF _____ V04 0495



Nachfüllpack für Interim-Stand

Schaumstoffscheiben
55 Stück

REF _____ V04 0496



Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Patienten

- Alle Mtwo® Instrumente sind steril in Blistern verpackt.
- Kein Sterilisieren vor der ersten Anwendung.
- Gebrauchsfertige Instrumente einzeln entnehmbar.
- TÜV-geprüftes Qualitätsmanagement.



Wir bringen Hygiene auf den Punkt!
Sterile Endo-Produkte seit über 30 Jahren.

Bitte fordern Sie weitere Informationen zum Mtwo® Aufbereitungssystem an:

- Mtwo® Anwenderkarte
- Mtwo® Anwenderbroschüre
- Mtwo® Studienübersicht
- Mtwo® Torquekarte
- Mtwo® Revisionsinstrumente-Info



VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15 • 81737 München • Deutschland
Tel. +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com • info@vdw-dental.com