

**3M™ Polyether Contact
Tray Adhesive (blau)**


NEU

VS

**3M™ Polyether
Adhesive (rot)**

Indikationen

Geeignet für alle gängigen standardisierten und individualisierten Löffel aus Metall, Methacrylat oder Polypropylen in Kombination mit allen Polyether Abformmaterialien von 3M.

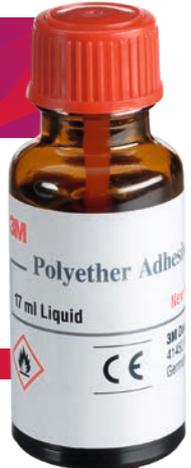

Handling

Ähnlich wie früheres blaues
3M Polyether Adhäsiv

Handling

Viskosität und Handhabung ähnlich
wie Löffeladhäsiv für Silikon

Viskosität

Dünn



Viskosität

Dick



Oberflächenstruktur

Nicht klebend

Oberflächenstruktur

Klebrig


Empfohlene Trockenzeit

Metalllöffel 1 Minute
Individueller Löffel 1 Minute



Empfohlene Trockenzeit

Metalllöffel 2 Minuten
Individueller Löffel 5 Minuten

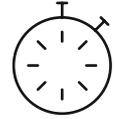

Reinigung

Das Adhäsiv verbleibt am Abformmaterial.
Reste sind mit Lösungsmittel
(Aceton, Ethanol) zu entfernen.

Reinigung

Das Adhäsiv verbleibt am Löffel /an der Prothesen-
basis und am Abformmaterial. Die Adhäsivschicht
lässt sich mit dem Finger vom Löffel entfernen.
Unter Wasser ist sie besonders schnell und ein-
fach abzulösen. Alternativ können kommerziell
erhältliche Reinigungsmittel für Abformlöffel
(z. B. Pluraclean orange, Pluradent, oder Solitine™,
Kerr) eingesetzt werden.



Bestellnummer **69408** 1 Flasche – 17 ml

Bestellnummer **30600** 1 Flasche – 17 ml



3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld
Freecall: 0800-275 3773
Freefax: 0800-329 3773
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Webseite: 3m.de/oralcare

3M Schweiz GmbH
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
E-Mail: 3mespech@mmm.com
Webseite: 3mschweiz.ch/oralcare

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
E-Mail: dental-at@mmm.com
Webseite: 3maustria.at/oralcare